



NÁVOD K POUŽITÍ
TOALETNÍ ŽIDLE 9062, 9063, 9064



CE

Než uživatel přistoupí k užívání výrobku, je povinen se seznámit s celým obsahem návodu. Tento návod má posloužit k řádnému používání výrobku. Pamatujte prosím, že dodržování pokynů obsažených v tomto návodu, prodlouží životnost a vzhled výrobku a umožní jeho bezpečné používání. Vyhrajujeme si právo na zavedení změn a vylepšení každého z produktů, uvedených v tomto návodu, bez předchozího vyznění.

1. Popis výrobků

Toaletní židle model byly vyvinuty s myšlenkou na jejich komfortní využití. Stabilní konstrukce zajišťuje bezpečnost uživatelům i vyšší váhy (viz. tabulka Technické data).

Výhoda toaletních židlí spočívá v tom, že jsou vybaveny toaletním zásobníkem a také pohodlným čalouněním, což zaručuje vysoký komfort používání.

Židle jsou určeny k používání doma, ale i v domovech sociální péče. Další výhodou těchto modelů je jejich využití jako židle ke standardním účelům. Model 9042 je navíc skladatelný čímž se usnadňuje jeho skladování v malých prostorech včetně jeho přepravy.

Při individuálním výběru toaletní židle vždy mějte na paměti:

- výšku a váhu těla
- fyzickou a psychickou kondici
- podmínky bydlení
- prostředí

2. Technické data

Model	
Celková výška	920 mm
Šířka sedáku	470 mm
Celková šíře židle	560 mm
Hloubka sedáku	460 mm
Výška sedáku od podložky	510 mm
Výška područek od sedáku	175 mm
Přípustné odchylky +/- 10 mm	
Celková váha židle	8.6 kg
Maximální zatížení	95 kg

3. Standardní výbava

- čalouněná toaletní deska a odnímatelný sedák
- čalouněné opěradlo
- čalouněné područky (odklopné u modelu 9042)
- závěsná toaletní nádoba s poklicí
- návod
- záruční list

4. Postup použití

4.1 Užívání toalety

Model 9012 a 9042 má speciální toaletní nádobu, která je upevněná pod sedákem. Vyjmutí a vložení nádoby je možné jen z boční strany židle.

Pozor! Vždy je nutno zkontrolovat, zda je nádoba správně usazená na kolejnicích a zasunutá na doraz - tak, aby byla ve středu otvoru sedáku.

4.2 Skládání a rozkládání židle model 9042

Před složením židle k přepravě musíte:

- vyjmout toaletní nádobu
- odejmout odklápěcí sedák
- složit područky „ nahoru “
- uchopit za opěradlo a vnitřní část sedáku a skládáním do sebe až po citelný odpor

Rozkládání provádíme podobným způsobem jen v opačném postupu.

Pozor ! Židle je rozložená až tehdy, kdy se trubky předního rámu nacházejí v pouzdrech

5. Bezpečnostní zásady

Aby využití tohoto výrobku bylo bezpečné mějte na paměti:

- před usednutím se ubezpečte, že židle stojí na vodorovném povrchu a je celkově rozložená (model 9042)
- nepřekračujte přípustné zatížení (viz tabulka Technické data)
- věnujte pozornost násadkám na nožkách (pokud násadky chybí nebo jsou poškozeny, hrozí nebezpečí uklouznutí v průběhu usedání nebo vstávání ze židle).

6. Prohlídky

6.1 Před každým použitím

Podobně jako i jiné výrobky, tak i židle musíte kontrolovat, což Vám zajistí jejich správnou funkčnost a komfort používání po dlouhou dobu:

- zkontrolovat stav násadek
- zkontrolovat upevnění čalouněných částí
- zkontrolovat stav čalouněného potahu

6.2 Co 6 měsíců

- uskutečnit kompletní čištění

Veškeré opravy a montáže je možno uskutečnit jedině s originálními díly pocházejícími od našich distributorů. V případě použití neoriginálních částí výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost.

7. Čištění a ošetřování

Aby si Váš výrobek zachoval také dobrý vzhled, musíte mu zabezpečit správné ošetření a níže uvedené poznámky Vám umožní tohoto cíle dosáhnout.

7.1 Čalounění

- doporučuje se mýt teplou vodou a při silném znečištění čistěte ručně pomocí jemných pracích prostředků
- čalounění nesmíte čistit velmi silnými prostředky např. ředidly a žíravinami, také nedoporučujeme používání tvrdých kartáčů
- za škody vzniklé používáním nesprávných čistících prostředků nepřebíráme zodpovědnost
- v průběhu čištění nedopusťte promočení čalounění
- čištění tlakem páry se nedoporučuje

7.2 Umělohmotné části

Tyto části čistěte ručně pomocí obecně dostupných prostředků a před použitím se seznamte s návodem od výrobce tohoto prostředku.

7.3 Vnější povlaky

Použití vrstvy laku má velký estetický význam a chrání kovové části před korozí. Lakované povrchy nevyžadují speciální zacházení při čištění (většinou je stačí utřít suchým nebo navlhčeným hadříkem). V případě mechanického poškození může nastat stržení povrchu laku. Doporučujeme co nejdříve doplnit případný úbytek. Lakovaná místa vystavená třením doporučujeme namazat tenkou vrstvou technické vazelíny. Chromované části je nejlépe čistit suchým hadříkem a v případě poškození této vrstvy ji obnovte chromu podobným prostředkem.

7.4 Dezinfekce

Dezinfekci můžeme provádět obecně dostupnými prostředky, které jsou k tomu určené a před použitím se seznamte s návodem k použití. Nezapomeňte, že mohou také prosáknout dovnitř čalouněných dílů

- v průběhu činnosti používejte ochranné rukavice a postupujte shodně s doporučením výrobce tohoto prostředku
- za veškeré důsledky nesprávného používání dezinfekčního prostředku nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost

8. Záruční podmínky

VERMEIREN Polska sp.z o.o. bere na sebe odpovědnost za eventuální poškození materiálu nebo technologické chyby vzniklé v procesu výroby po vymezenou dobu, která se počítá od data prodeje. Záruční doba pro toaletní židle a modely 9012 a 9042 je stanovena na 24 měsíců.

Záruční podmínky budou zachovány, pokud naše produkty budou používány shodně s popsányými zásadami a také shodně k účelům jim určeném.

Záruku se nevztahuje na:

- náklady na transport, obsluhu a jiné nároky
- za poškození vzniklé při konstrukčních změnách, které si vykonal sám uživatel
- části podléhající otěru
- škody způsobené výrobkem uživatele
- škody vzniklé jinými vnějšími vlivy
- poškození vzniklé použitím neoriginálních výměnných částí a náhradních dílů

Na všechny záležitosti spojené se zárukou na náš výrobek se prosím obraťte na naše prodejní místa a distributory.

VÝROBCE

VERMEIREN Polska Sp. z o.o.
Ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Tel. +48 071 387-42-00
Fax +48 071 387-05-74
e-mail: info@vermeiren.pl
www.vermeiren.pl

ZASTOUPENÍ

VERMEIREN ČR s.r.o.
Nádražní 1387/132
702 00 Ostrava 1
e-mail: info@vermeiren.cz
www.vermeiren.cz